

## Uputstvo za upotrebu

### **ID K162 DS za jednokratnu upotrebu AEG ID INTELLIGENTIFICATION Za upotrebu u veterinarstvu -**

Tehničke informacije o AEG ID ID K162 DS za jednokratnu upotrebu

**Naziv:** AEG ID ID K162 DS, jednokratno sredstvo.

**Sastav:** ID K162 DS je izrađen tako da kombinira kanilu uključujući stakleni transponder unutra, kao i injektor. Stakleni transponder je već podešen i osiguran zaštitnom kapicom transpondera. Transponder i šprica su sterilizirani unutar pakovanja, čisti i spremni za upotrebu kada se pakovanje otvori.

U prilogu pakovanja ovog jednokratnog sredstva su šest tipova 128 barkodova uključujući ISO standard 11784/85 kodni broj proizvođača i/ili kod države u kojoj se primjenjuje.

TDX –B sistem očitavanja.

**Način upotrebe:** Samo za pse.

Kako je šprica naoštrena laserom s ciljem da se garantuje što manje nanošenje boli životinji, molimo da uvijek osigurate da je zaštitna kapica stavljena na špricu. Nakon uklanjanja zaštitne kapice sredstvo za jednokratnu upotrebu je spremno za korištenje.

Na zadnjoj strani pakovanja naći će te datum isteka sterilizacije. Stoga, koristite jednokratno sredstvo prije tog datuma da bi osigurali čist i sterilan postupak.

Također, na slici je navedena obavezna temperatura skladištenja (0-30°C).

Nakon aplikacije vratiti zaštitnu kapicu

**Aplikaciju vrši samo veterinar (doktor veterinarske medicine)**

**Posebna upozorenja:**

Prije injektiranja transpondera molimo pročitajte etiketu unaprijed kako bi bio efikasan.

Nakon injektiranja transpondera ponovo pročitati da bi se osigurala funkcija očitavanja.

Etikete sa barkodovima se koriste za dokumentiranje kod veterinara, odnosno evidentiranju i izvještavanju o ljubimcu i njegovom ISO broju kod nadležnog tijela za vođenje baze podataka.

**Način uklanjanja otpada:** Bacanje ostataka veterinarsko – medicinskog sredstva nakon upotrebe ili oštećenog sredstva, odnosno isteklog roka

sterilizacije vrši se u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/03).

**Način čuvanja:** Čuvati na temperaturi od 0 - 30°C. Držati van dosega djece i nestručnih lica, budući da se mogu ovim sredstvom povrijediti.

**Broj i datum odobrenja za stavljanje u promet u BiH:** UP-I-06-2-24/17-34/18, od 18. 01. 2018. godine.

**Naziv i adresa proizvođača:**

AEG ID INTELLIGENTIFICATION  
Hörvelsinger Weg 47  
89081 Ulm - GERMANY

**Naziv i adresa uvoznika i distributera:**

„BOSNA VET“ d.o.o. Zenica  
Goraždanska br. 36A, Zenica